

Требования к оттискам и гипсовым моделям


Для получения гипсовых моделей для изготовления изилайнеров необходимо снять оттиск, используя перфорированную ложку и поливинил силикон (база и корректор).

[Видео.](#)

Модель* следует изготовить из гипса высокой прочности (супергипс), включая цоколь, который не должен превышать 3 см в высоту. Не забудьте вместе с моделью выслать прикусной блок.

[Видео.](#)

Отметьте маркером центральную линию.

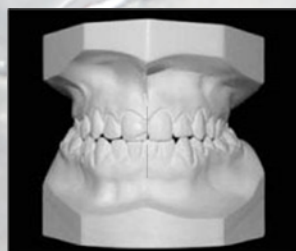

При обрезании гипсовой модели оставляйте десневой край не менее 10 мм.

*Если вы уверены в качестве вашего оттиска, то можно не отливать гипсовую модель, а выслать эти оттиски. В этом случае ложки должны быть пластмассовые с прямыми ручками, также необходимо снять

[прикусную пластину из силикона.](#)

Учтите, что оттискная масса не должна быть красного (или его оттенков) цвета. В случае передачи оттиска, ответственность за некорректный оттиск ложится на врача.

